

# clinell®


## Καθαριότητα

biokon  
MEDICAL & BIOTECH  
PRODUCTS LTD

### Πώς



Τοποθετήστε τη συσκευασία κοντά στα σημεία εφαρμογής

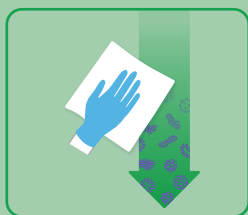


Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια



Καθαρίστε σε σχήμα S χωρίς να περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές




Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο

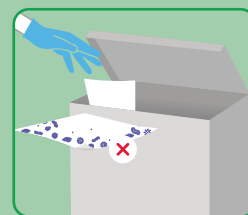

Χρησιμοποιείτε διαφορετικό πανάκι σε κάθε νέα επιφάνεια

### Που

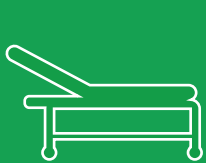

Καθίσματα



Μηχανήματα



Όργανα



Διακόπτες



Λαβές

### Πότε



Μετά από κάθε χρήση



Τακτικά τα σημεία συχνής επαφής

Με τα **Clinell®** μπορείτε να διατηρήσετε το περιβάλλον πάντα **καθαρό & ασφαλές**



**Χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά με προσοχή.**

Τα Clinell® είναι δραστικά κατά του ιού της γρίπης, του νοροϊού και του ιού SARS-CoV-2 σε 30". Εφαρμόστε καθημερινά σύμφωνα με τις βασικές αρχές καθαρισμού. Πριν τη χρήση να διαβαζέτε πάντα την προϊοντική ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης.

CE0473

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIa.

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Λεωφόρος Μαραθώνος 112 Τ: 2108049747  
15344 Γέρακας F: 2108049377  
info@biokon.gr  
www.biokon.gr

biokon  
MEDICAL & BIOTECH  
PRODUCTS LTD