

NDP Air Total+

Σύστημα εκνεφούμενου απολυμαντικού επιφανειών

ΤΟ
Νέο Στάνταρ
στην
Καθημερινή
Απολύμανση

Ιδανικό για την τελική απολύμανση. ✓

Πλήρης αποδέσμευση μονοδόσης επιτρέπει στο προϊόν να φτάσει ακόμα και τις δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. ✓

Σχεδιασμένα για ιατρικές επιφάνειες. ✓

Ευρεία συμβατότητα με επιφάνειες. ✓

Περιέχει οικολογικό προωθητικό αέριο. ✓

**Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο
Μυκοβακτηριοκτόνο, Ιοκτόνο.**



Σκανάρετε
για να δείτε
τις οδηγίες
χρήσης

CE 0476

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



NDP Air Total+ Green

Τύπος Προϊόντος

Βιοκτόνο ευρέους φάσματος

Εφαρμογές

- Χειρουργικές Αίθουσες
- Ασθενοφόρα
- Εργαστήρια και καθαροί χώροι
- Περιοχές εξωτερικών ιατρείων
- Ιατρικά κέντρα και κτηνιατρεία
- Μέσα μεταφοράς
- Συστήματα κλιματισμού

Αποτελεσματικότητα

- **Βακτηριοκτόνο:** (EN1276, EN13697, EN13727)
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bordetella bronchiseptica
- **Μυκοβακτηριοκτόνο:** (EN14348)
Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae
- **Μυκητοκτόνο:** (EN1650, EN13697, EN13624)
Aspergillus niger, Candida albicans
- **Ιοκτόνο:** (EN14476)
H1N1, υποκατάστατος ιός στους λιπόφιλους ιούς (Εμπολα, Κορωνοϊός, Γρίπη, Ηπατίτιδα, HIV)

Σύνθεση (w/w)

- Didecyl dimethyl ammonium chloride
- 2-Phenoxyethanol
- Cinnamaldehyde
- Propellant and excipients

50ml για χώρους έως 40m³
300ml για χώρους έως 150m³



NDP Air Total+ Green
περιέχει οικολογικό προωθητικό αέριο HFO (υδροφθορο-οφελίνη)

NDP AIR TOTAL + GREEN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
AT+GC50DIFE	50 ml	12 ΔΟΧΕΙΑ
AT+GC300IFE	300 ml	12 ΔΟΧΕΙΑ

CE 0476 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IIA ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Το **NDP Air Total+ Green** CE είναι ένα προϊόν για εκνεφούμενη απολύμανση επιφανειών ιατρικού εξοπλισμού. Χάρη στο **σύστημα πλήρους αποδέσμευσης μονοδόσης** που διαθέτει, νεφελοποιεί αποτελεσματικά το απολυμαντικό σε μία εφαρμογή, επιτρέποντας στο προϊόν να φτάσει σε περιοχές που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν δύσκολα προσβάσιμες.

Προσφέρει ευρεία και άμεση **βιοκτόνα δράση** κατά των βακτηρίων, μυκοβακτηρίων, μυκήτων και ιών.

Δεν περιέχει εύφλεκτα αέρια και τοξικά συστατικά. Έτσι καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του σε χώρους που άλλα προϊόντα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον, είναι **πλήρως συμβατό** με όλων των ειδών τα υλικά και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Προετοιμασία

Λάβετε τα μέτρα προστασίας, που προβλέπονται κατά τη χρήση απολυμαντικών ουσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρωτόκολλο ή όποια άλλη σχετική οδηγία.



Σωστή διαστασιοποίηση του δωματίου

Ελέγξτε τις διαστάσεις και το σχήμα του χώρου που πρόκειται να απολυμανθεί. Χρησιμοποιήστε τον ανάλογο τύπο/αριθμό δοχείων.



Προετοιμασία χώρου

Απενεργοποιήστε τυχόν αισθητήρες καπνού και κλείστε τυχόν σύστημα εξαερισμού εν λειτουργία.

Εφαρμογή

Λάβετε τα μέτρα προστασίας, που προβλέπονται κατά τη χρήση απολυμαντικών ουσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρωτόκολλο ή όποια άλλη σχετική οδηγία.



Άνοιγμα φιάλης

Κρατείστε τη φιάλη κάθετα προς το σώμα σας, και με το επάνω μέρος της φιάλης να είναι στραμμένο προς απομακρυσμένη κατεύθυνση. Αφαιρέστε τη ταινία ασφαλείας.



Εφαρμογή προϊόντος

Πιάστε σφιχτά και γυρίστε με μια απλή περιστροφική κίνηση την μονοδοσική βαλβίδα ολικής εκτόνωσης. Τοποθετήστε το δοχείο σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.



Προειδοποιητική Σήμανση

Απομακρυνθείτε άμεσα από το χώρο, σφραγίστε τον, και τοποθετήστε την ετικέτα σήμανσης. Το προϊόν σχηματίζει νέφος σε 1-3'.



Χρόνος Ασφαλείας

Μόλις ολοκληρωθεί η αποφόρτιση, αφήστε το προϊόν να ενεργήσει για 1 ώρα. Αερίστε πριν εισέλθετε στο χώρο.

